


## Incidin® Foam

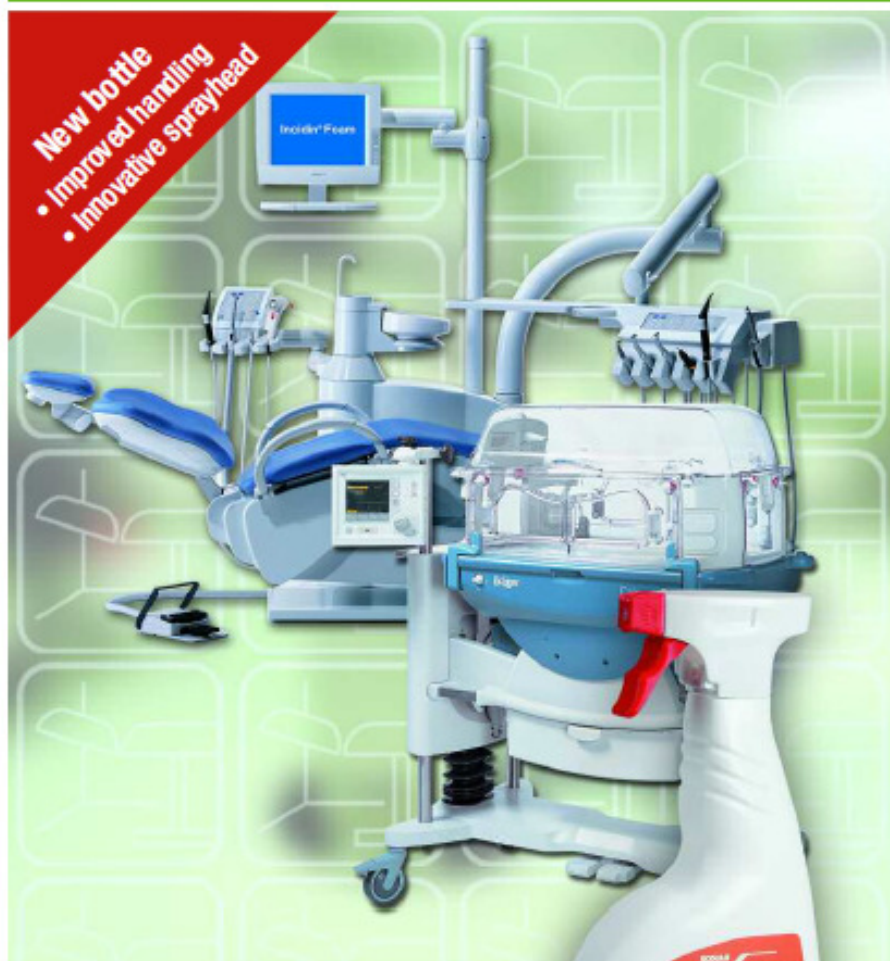

Pulverizator cu spumă, gata de utilizare, pentru dezinfectie rapidă



- Putere de curățare foarte bună
- Nu se formează aerosoli
- Delicat dar eficient



# Incidin® Foam



Spumă gata de utilizare pentru curățarea și dezinfectia rapidă a suprafețelor dispozitivelor medicale.

CE 0297



Spumă gata de utilizare pentru curățarea și dezinfectia rapidă a diverselor suprafețe rezistente la alcool.

**Descrierea produsului**  
Spray cu spumă gata de utilizare cu acțiune rapidă pentru suprafețe sensibile în spațiile medicale.



## Oferta noastră

Spectru larg împotriva bacteriilor (inclusiv TB), fungilor, virusurilor papova-, adeno-, vaccinia-, rota-virusuri, HBV, precum și HIV.

Pulverizare sub formă de spumă

Conține Glucoprotamină

Formulare sinergică balansată, cu diferiți agenți activi

Gata de utilizare

Timp de contact extrem de scurt

Testat în mod extensiv în privința compatibilității cu materialele

Parfum plăcut de citrice

## Beneficiul dumneavoastră

Siguranță crescută în dezinfectia tuturor suprafețelor și obiectelor

Nu se inhalează aerosoli

Umectare vizibilă a suprafețelor, dezinfectie blândă

Fără aldehide, excelentă toleranță pentru utilizatori

Umectare eficientă a suprafețelor, alcoolii asigură uscarea rapidă, și o bună eficacitate a curățării

Ușor de manipulat, gata de utilizare

Dezinfectie rapidă și siguranță pentru pacienți și obiecte. Permite utilizarea imediat și frecvent după dezinfectie a suprafețelor și dispozitivelor medicale.

Se utilizează pe: metal, plastic, suprafețe lăcuite, (de ex. scaune stomatologice), policarbonat, polisulfonat, sticlă acrilică etc.

Condiții de lucru plăcute pentru personal, curățenie și igienă vizibile pentru pacienți

## Aplicare/domeniu de utilizare

Spray cu spumă gata de utilizare cu acțiune rapidă pentru echipamente medicale conform Directivei Europene privind dispozitivele medicale (93/42/EEC). De asemenea este recomandat și pentru alte suprafețe rezistente la alcool.

## Ambalare

16 x 750 ml flacoane în cutii cu 2 pulverizatoare  
16 x 750 ml - cod 3021800

2 x 5L canistre/cutie  
2 x 5L - cod 3013440

## Instrucțiuni de utilizare

Pulverizați întreaga suprafață de la aproximativ 30 cm (40 mL/m<sup>2</sup>). Lăsați produsul să acționeze rapid și apoi ștergeți cu o lavetă curată, fără scame. Alternativ, utilizați produs nediluat pe lavetă, ștergeți suprafața și lăsați să se usuce.

## Ingrediente/substanțe active

100 g lichid conțin: 20 g 2-propanol, 10 g etanol, 0,2 g clorură de benzalconiu, 0,01 g glucoprotamină.

## Securitate

Utilizați dezinfectanții și produsele de curățare în condiții de securitate. Citiți întotdeauna eticheta și instrucțiunile atașate înainte de utilizare.

## Condiții de depozitare

A se depozita între 0°C și 25°C.

Eficacitate biocidă	Timp de contact
Dezinfectia suprafeței conform metodelor DGHM	5 minute
Dezinfectia rapidă împotriva bacteriilor conform DGHM	1 minut
Eficacitate împotriva HBV (incl. HIV)	5 minute
Eficacitate împotriva: - vaccinia (elstree) - adeno (adenoid 6) - papova SV (777) virusurilor	1 minut 1 minut 30 secunde
Eficacitate împotriva: rota virusurilor	30 secunde

European Headquarter  
Reisholzer Wertstraße 38-42  
40589 Düsseldorf  
Phone ++49 211 9893-0

Ecolab SRL  
Iasi, Str. Sfântul Lazăr nr. 50, et 2  
RO-700049,  
Tel 0232-22 22 10

Bucuresti, Șos. Pipera 46F  
Cod 020112  
Tel: 031 805 87 00